

ARCHIPLAN 3D

---

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## 01 | ¿CÓMO PUEDO ACTUALIZAR MI ORDENADOR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE DE ARCHIPLAN?

Antes de instalar una nueva versión de Archiplan, se recomienda desinstalar la versión anterior.

Este procedimiento también es útil en caso de mal funcionamiento del software, que en la mayoría de los casos se debe a instalaciones incorrectas.

## 02 | INSTRUCCIONES PARA WINDOWS:

1. Primero, verifica que tu ordenador cumpla con los requisitos mínimos del sistema (ver documento al final de este artículo);
2. Abre Archiplan y haz clic en el ícono de Configuración -> Mostrar carpeta de configuración (C:\Users\nombre del Usuario PC\AppData\Roaming\RealGUIDEsweden-martina). El nombre de la carpeta de configuración es diferente si has instalado una versión para partners y contiene el nombre de la empresa asociada;
3. Cierra Archiplan;
4. Elimina únicamente los archivos contenidos en la carpeta RealGUIDEsweden-martina.  
Antes de eliminar la carpeta, asegúrate de haber guardado una copia de los archivos personalizados de Archiplan, si se han creado (se recomienda leer este artículo para guardar archivos personalizados creados en Archiplan);
5. Haz clic en el ícono de Inicio de Windows, desplázate por la lista de programas instalados (NO utilices la herramienta de búsqueda), encuentra el software Archiplan (donde x es el número de la versión instalada) y haz clic en Desinstalar;
6. Ejecuta el instalador de la nueva versión de Archiplan y sigue el procedimiento de instalación guiada que se te indique.

## 03 | INSTRUCCIONES PARA MAC:


1. Primero, verifica que tu ordenador cumpla con los requisitos mínimos del sistema (ver documento al final de este artículo);
2. Abre Archiplan y haz clic en el ícono de Configuración -> Mostrar carpeta de configuración (Macintosh>Usuarios>nombre del Usuario MAC>config.>RealGUIDEsweden-martina). El nombre de la carpeta de configuración es diferente si has instalado una versión para partners y contiene el nombre de la empresa asociada;
3. Cierra Archiplan;
4. Elimina únicamente los archivos contenidos en la carpeta RealGUIDEsweden-martina.

Antes de eliminar la carpeta, asegúrate de haber guardado una copia de los archivos personalizados de Archiplan, si se han creado (se recomienda leer este artículo para guardar archivos personalizados creados en Archiplan);

5. Busca el software Archiplan en el Finder de MAC, sección APP, selecciónalo y haz clic en Mover a la Papelera;
6. Ejecuta el instalador de la nueva versión de Archiplan y sigue el procedimiento de instalación guiada que se te indique.

En caso de versiones para partners, instala la última versión proporcionada por el distribuidor.

**ATENCIÓN:** Los datos de los pacientes están contenidos en la carpeta RealGUIDE50-DB. Eliminar dicha carpeta supondría la pérdida definitiva de los datos en la memoria local.

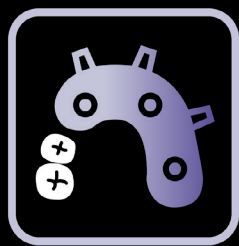

ARCHIPLAN 3D

---

REQUISITOS DE HARDWARE RECOMENDADOS

## REQUISITOS DE HARDWARE RECOMENDADOS



**PROCESADOR:** Intel I5 o I7 (para portátiles).  
Recomendado Quad Core (para estaciones de trabajo).  
**RAM:** mínimo 4 GB.  
8 GB para apilar imágenes que incluyan un cráneo completo.  
**DISCO DURO:** 300 – 500 GB  
**TARJETA GRÁFICA:** recomendada vRAM igual o superior a 3 GB.  
Para un rendimiento máximo, Nvidia GTX o la línea QUADRO.  
**RESOLUCIÓN DEL MONITOR:** 1920x1080 (Full HD) para una visualización óptima.  
**SISTEMA OPERATIVO:** Windows 10, 11.



Mac MacBook Pro 15".  
iMac series  
**SISTEMA OPERATIVO:** OS  
(12 Monterey, 13 Ventura)



iOS iPad Pro.  
**SISTEMA OPERATIVO:**  
iOS 16.

Para una gestión óptima de la plataforma CLOUD, se requiere una conexión a Internet estable.



---

[WWW.SWEDEN-MARTINA.COM](http://WWW.SWEDEN-MARTINA.COM)