



ARCHIPLAN 3D

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

01 | COME POSSO AGGIORNARE IL MIO COMPUTER ALL'ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE DI ARCHIPLAN?

Prima di installare una nuova versione di Archiplan, è consigliabile disinstallare la versione precedente.

Questa procedura è utile anche in caso di malfunzionamenti del software, che sono nella maggior parte dei casi dovuti ad installazioni errate.

02 | ISTRUZIONI PER WINDOWS

Prima di tutto, verificare che il proprio computer rispetti i requisiti minimi di sistema (vedi documento in fondo a questo articolo);
aprire Archiplan e cliccare sull'icona Impostazioni -> Mostra cartella impostazioni (C:\Users\nome Utente PC\AppData\Roaming\RealGUIDEsweden-martina). Il nome della cartella delle impostazioni è diverso se avete installato una versione partner e contiene il nome dell'azienda partner stessa;

chiudere Archiplan;

cancellare solo ed esclusivamente i file contenuti nella cartella RealGUIDEsweden-martina.

Prima di cancellare la cartella, assicurarsi di aver salvato una copia dei file Archiplan custom, se ne sono stati creati (si consiglia di leggere questo articolo per salvare file custom creati in Archiplan);
fare clic sull'icona Start di Windows, scorrere l'elenco dei programmi installati (NON utilizzare lo strumento Cerca), trovare il software Archiplan (dove x è il numero della versione installata) e fare clic su Uninstall;

eseguire l'installer della nuova versione di Archiplan e seguire la procedura di installazione guidata proposta.

03 | ISTRUZIONI PER MAC:

Prima di tutto, verificare che il proprio computer rispetti i requisiti minimi di sistema (vedi documento in fondo a questo articolo);
aprire Archiplan e clicca sull'icona Impostazioni -> Mostra cartella impostazioni (Macintosh>Utenti>nome Utente MAC >config.> RealGUIDEsweden-martina). Il nome della cartella delle impostazioni è diverso se avete installato una versione partner e contiene il nome dell'azienda partner stessa;
chiudere Archiplan;
cancellare solo ed esclusivamente i file contenuti nella cartella RealGUIDEsweden-martina.

Prima di cancellare la cartella, assicurarsi di aver salvato una copia dei file Archiplan custom, se ne sono stati creati (si consiglia di leggere questo articolo per salvare file custom creati in Archiplan);
cercare il software Archiplan nel Finder di MAC, sezione APP, selezionarlo e cliccare Sposta nel Cestino;
eseguire l'installer della nuova versione di Archiplan e seguire la procedura di installazione guidata proposta.
In caso di versioni partner, installare l'ultima release messa a disposizione dal distributore stesso.

ATTENZIONE: i dati dei pazienti sono contenuti nella cartella RealGUIDE50-DB. La cancellazione di tale cartella comporterebbe la perdita definitiva dei dati nella memoria locale.



ARCHIPLAN 3D

REQUISITI HARDWARE CONSIGLIATI

REQUISITI HARDWARE CONSIGLIATI



PC

PROCESSORE: Intel I5 o I7 (per PC portatili).

Consigliato Quad Core (per Workstation)

RAM: minimo 4 GB.

8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo

HARD DISK: 300 – 500 GB

SCHEDE VIDEO: consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.

Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO

RISOLUZIONE MONITOR: 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10, 11



MAC

MacBook Pro 15"

iMac series

SISTEMA OPERATIVO: OS

(12 Monterey, 13 Ventura)



iOS

MacBook Pro 15"

iMac series

SISTEMA OPERATIVO: OS

(12 Monterey, 13 Ventura)

Per la gestione ottimale della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione ad Internet stabile



WWW.SWEDEN-MARTINA.COM